


# circaid® – das Original in der adaptiven Kompression

Ihre effektive und leitliniengerechte Lösung für die Entstauung von Lymphödemem und ausgeprägten venösen Ödemem sowie die Behandlung des Ulcus cruris venosum.

Mit Hilfsmittelnummer – budgetneutrale Verordnung!

## 1 circaid Built-In-Pressure System (BPS)

Einstellbarer, kontrollierbarer und jederzeit nachjustierbarer Kompressionsdruck, dank einzigartiger Messkarte  
 ✓ Nach proximal graduiert abfallender Druckverlauf

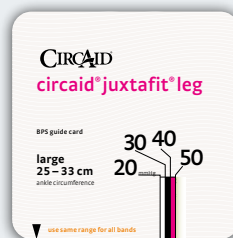

## Patientenindividuell einstellbarer Kompressionsdruck

Kompressionsklasse medizinischer Kompressionsstrumpf	CCL 1	CCL 2	CCL 3	CCL 4	
Intensität	Leicht	Mittel	Kräftig	Sehr kräftig	
Druck in mmHg	18 – 21	23 – 32	34 – 46	> 49	
circaid Kompressionsbereiche in mmHg	10 – 20*	20 – 30	30 – 40	40 – 50**	50+***

\* nur circaid juxtafit essentials Arm  
 \*\* nur circaid juxtalite und juxtafit Beinversorgungen  
 \*\*\* nur circaid juxtafit Beinversorgungen

## 2 Breathe-O-Prene

Unelastisches, geruchshemmendes Material mit antibakteriellem Effekt

## 3 Einfache Handhabung

Nach Einweisung durch Fachpersonal einfaches An- und Ablegen der Versorgung  
 ✓ Fördert Selbstmanagement  
 ✓ Erleichtert Körperhygiene

## 4 Juxtaposed Band-System

System aus einzelnen, ineinandergreifenden Bändern  
 ✓ Nachjustieren der einzelnen Bänder verhindert einen Druckverlust  
 ✓ Weniger fehleranfällig im Vergleich zu Kompressionsbandagierungen<sup>1</sup>  
 ✓ Vermeidung von Fensterödemen

## 5 Kompressive Socke

Kompression für Fuß und Sprunggelenk  
 ✓ Beugt Ödemem im Vorfuß vor  
 ✓ Tragen normaler Schuhe möglich

## 6 Optimales Hygienemanagement

✓ Zwei Unterziehstrümpfe für optimale Hygiene  
 ✓ Geeignet für Waschmaschine und Trockner




# circaid® – das Original in der adaptiven Kompression

## ✓ Budgetneutral und leitliniengerecht verordnen

- Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK, z. B. circaid Produkte) werden in der S2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie“ als Alternative zur Wickelbandagierung empfohlen.<sup>1</sup>
- circaid Produkte sind medizinische Hilfsmittel und können deshalb budgetneutral verordnet werden.

## ✓ Kompressionsdruck sichern

- Das integrierte Messsystem ermöglicht es, den Kompressionsdruck korrekt einzustellen.
- Der Kompressionsdruck kann jederzeit mit der Messkarte kontrolliert und bei Bedarf während des Tragens nachjustiert werden.

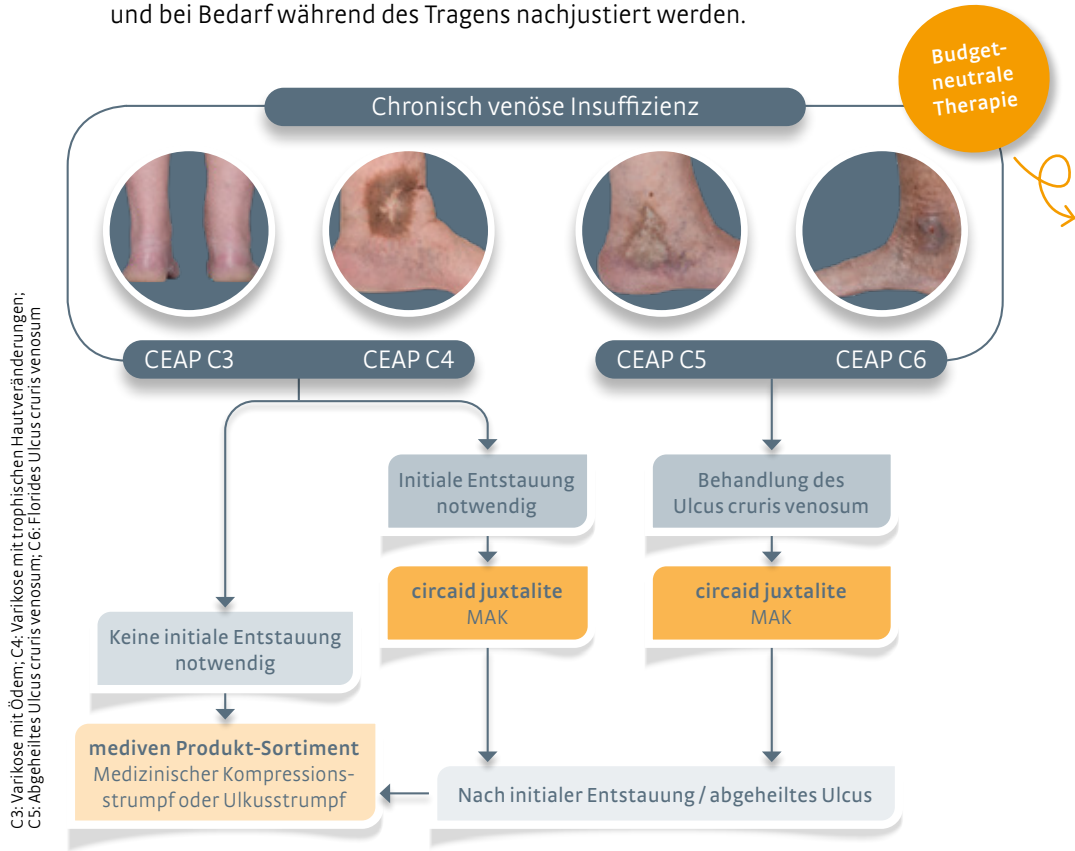


<sup>1</sup> Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: [www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html](http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html) (Letzter Zugriff 26.11.2021).

## ✓ Therapie-Ergebnis verbessern

- Ein kontinuierlicher Kompressionsdruck ist Voraussetzung für eine effektive Entstauung und Therapie der Grunderkrankung.
- Durch das Nachjustieren der einzelnen Bänder wird der therapeutisch notwendige Druck aufrechterhalten.
- Lückenlose Kompressionstherapie – An- und Ablegen jederzeit und unabhängig von Dritten möglich.
- Schnellere Wundheilung bei Ulcus cruris venosum.<sup>2,3</sup>
- Signifikant schnellere Entstauung von Lymphödemen.<sup>4</sup>

## ✓ Adhärenz steigern

- Nach Einweisung durch Fachpersonal erleichtert die einfache Handhabung Selbstmanagement sowie tägliche Körperhygiene und Hautpflege.
- Der angenehme Tragekomfort steigert die Therapie-Adhärenz.<sup>5</sup>
- Die kompressive Socke ermöglicht das Tragen normaler Schuhe und fördert dadurch die Mobilität.<sup>5</sup>

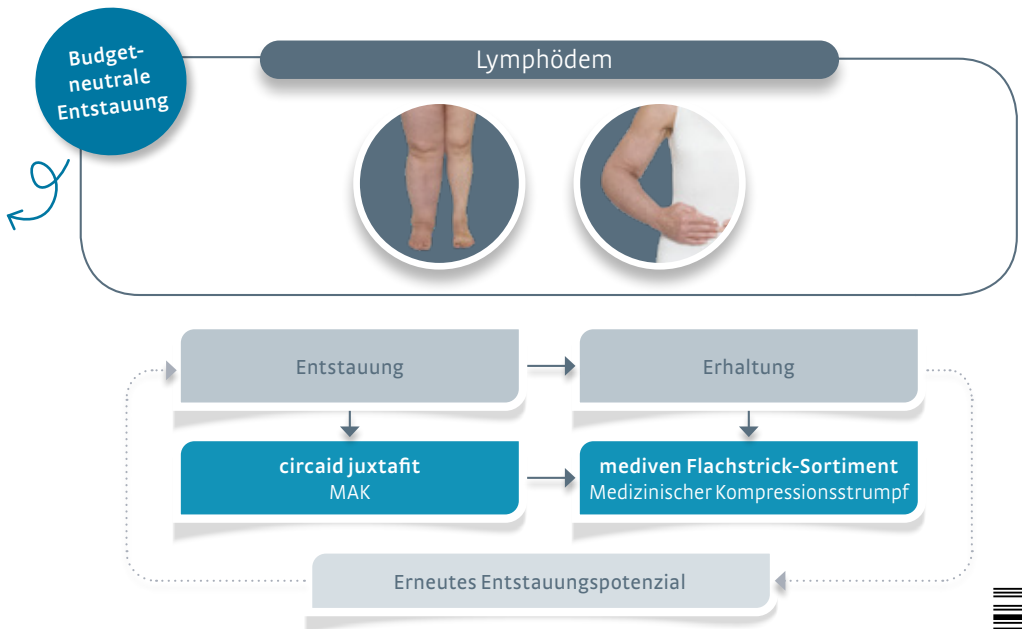

<sup>2</sup> Mosti G et al. Adjustable compression wrap devices are cheaper and more effective than inelastic bandages for venous leg ulcer healing. A Multicentric Italian Randomized Clinical Experience. Phlebology 2020;35(2):124-133.

<sup>3</sup> Stather PW et al. Review of adjustable velcro wrap devices for venous ulceration. In Wound J 2019;16(4):903-908.

<sup>4</sup> Damstra R et al. Prospective, randomized, controlled trial comparing the effectiveness of adjustable compression Velcro wraps versus inelastic multicomponent compression bandages in the initial treatment of leg lymphedema. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders 2013;1(1):13-9.

<sup>5</sup> Protz K et al. Kompressionsmittel für die Entstauungstherapie. Vergleichende Erhebung im Querschnitt zu Handhabung, Anpressdruck und Tragegefühl. Hautarzt 2018;69(3):232-241.



## circaid® juxtalite®

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) für die Entstauung ausgeprägter venöser Ödeme und zur Behandlung des Ulcus cruris venosum.

### Schnellere Wundheilung bei Ulcus cruris venosum<sup>2,3</sup>

- 2,5 mm dickes, unelastisches Breathe-O-Prene Material
  - Hohe Wandstabilität
  - Hoher Arbeitsdruck
- 4 Bänder für gleichmäßige Druckverteilung
- circaid kompressive Socke zur Versorgung des Fußes
- Als Unterschenkel-Versorgung erhältlich

#### Hinweis

circaid juxtalite ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikationen gelistet:

- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum

Hilfsmittelnummer  
Unterschenkel:  
17.06.23.0001

Für zusätzliche Kompression im Fußbereich kann ergänzend ein Fußteil verordnet werden.

Hilfsmittelnummer  
Fußteil:  
**beantragt**



## circaid® juxtafit® essentials

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) mit sehr hoher Wandstabilität – für die Entstauung von Lymphödemen.

### Signifikant schnellere Entstauung von Lymphödemem<sup>4</sup>

- 3,9 mm dickes, unelastisches Breathe-O-Prene Material
  - Sehr hohe Wandstabilität
  - Sehr hoher Arbeitsdruck
- 6 – 8 Bänder für eine anatomische Passform
- Fußteil mit hohem Arbeitsdruck enthalten
- Als Unterschenkel-, Oberschenkel mit Knie- und Arm-Versorgung erhältlich

#### Hinweis

circaid juxtafit essentials ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:

- Initiale Entstauung von Lymphödemem

Hilfsmittelnummer  
Unterschenkel: 17.06.23.0002  
Arm: 17.10.10.0001  
Oberschenkel mit Knie:

**beantragt**

Für zusätzliche Kompression im Fuß- oder Handbereich kann ergänzend ein Fuß- oder Handteil verordnet werden.

Hilfsmittelnummer  
premium interlocking Fußteil:

**beantragt**

Hilfsmittelnummer  
Handteil:

**beantragt**



**Zweckbestimmungen** circaid Beinversorgungen: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Beins. circaid Armversorgung: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Arms. circaid Fußoptionen: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Fußes und des Knöchels. circaid Handoption: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression der Hand. Ulcusstrumpf mediven ulcer kit: Rundgestricktes Kompressionsstrumpfsystem zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen des Venensystems. mediven Kompressionsstrümpfe: Rund- oder flachgestrickte / r medizinische / r Kompressionsstrumpf/-versorgung zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

**Indikationen:** siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtalite und circaid juxtafit essentials.

# Budgetneutrale Entlastung ausgeprägter venöser Ödeme und Behandlung des Ulcus cruris venosum

## Rezeptierung circaid juxtalite

**Rezeptbeispiel**

Krankenkasse bzw. Kostenträger	1 Hilfs- mittel- Nr.	Impf- stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
Gebühr frei	6	7	8	9	
Geb.- plf.	Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung		
noctu	geb. am		Gesamt-Brutto		
Sonstige	Klassen-Nr.		Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr.		
Unfall	Versicherten-Nr.		Faktor		
Arbeits- unfall	Status		Taxe		
	Vertragsarzt-Nr.		Vertragsarztstempel		
	VK gültig bis				
	Datum				

**Rp.** (Bitte Leerräume durchstreichen)

- auf idem 2 Ulcus cruris venosum
- auf idem 3 Medizinisches adaptives Kompressionssystem, circaid juxtalite Unterschenkel
- auf idem 4 1 Stück
- 5 30 – 40 mmHg
- 6 17.06.23.0001

- 1 Markieren Sie das Feld Nr. 7 mit der Ziffer „7“
- 2 Genaue Indikation / Diagnose (ICD-10-Code), individuelle Kontextfaktoren
- 3 Ggf. Produkt-Name (mit Begründung)
- 4 Anzahl der Versorgungen (1 Stück oder 2 Stück)
- 5 Erforderlicher Kompressionsdruck (z. B. 30 – 40 mmHg)
- 6 Hilfsmittelnummer

### circaid juxtalite ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikationen gelistet:

- Initiale Entlastung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum

#### Hinweis

Wenn sich das Beschwerdebild des Patienten im Verlauf verbessert, zum Beispiel **Rezidivprophylaxe bei Ulcus cruris venosum**, ist es möglich die Versorgung zu wechseln und budgetneutral zum Beispiel einen medizinischen Kompressionsstrumpf oder Ulcusstrumpf zu verordnen.

# Budgetneutrale Entstauung von Lymphödemen

## Rezeptierung circaid juxtafit essentials

**Rezeptbeispiel**

Krankenkasse bzw. Kostenträger		1 Hilfs- mittel- Nr.	Impf- stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK	
Gebühr frei	Name, Vorname des Versicherten		6	7	8	9	
Geb.- pfl.	geb. am		Zuzahlung		Gesamt-Brutto		
rechtl.							
Sonstige							
U-fall	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		
Adress- unfall	Vertragsarzt-Nr.		VK gültig bis		Datum	Faktor	
						Taxe	
						Vertragsarztstempel	

**Rp.** (Bitte Leerräume durchstreichen)

- auf idem 2 Entstauung Lymphödem
- auf idem 3 Medizinisches adaptives Kompressionsystem, circaid juxtafit essentials Unterschenkel
- auf idem 4 1 Stück
- 5 30 – 40 mmHg
- 6 17.06.23.0002

- 1 Markieren Sie das Feld Nr. 7 mit der Ziffer „7“
- 2 Genaue Indikation / Diagnose (ICD-10-Code), individuelle Kontextfaktoren
- 3 Ggf. Produkt-Name (mit Begründung)
- 4 Anzahl der Versorgungen (1 Stück oder 2 Stück)
- 5 Erforderlicher Kompressionsdruck (z. B. 30 – 40 mmHg)
- 6 Hilfsmittelnummer

### circaid juxtafit essentials ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:

- Initiale Entstauung von Lymphödemen

#### Hinweis

Wenn sich das Beschwerdebild des Patienten im Verlauf verbessert, zum Beispiel Lymphödem in der **Erhaltungphase**, ist es möglich die Versorgung zu wechseln und budgetneutral zum Beispiel einen flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrumpf zu verordnen.